



Produktinformation Schröpfgläser

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank dass Sie sich für ein NOZ Produkt entschieden haben. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Langlebigkeit aus.

Anwendung: Schröpfgläser dienen der Massage eines begrenzten Hautareals zur Steigerung des Wohlbefindens und sind Wellnessprodukte.

Ungeeignete Anwendung der Produkte: Eine andere oder darüber hinaus gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Weitere Hinweise, Wartung, Lagerung: Achten Sie stets darauf, dass das Schröpfglas keinen Stößen ausgesetzt wird, Bruchgefahr!

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie ab dem Verkaufsdatum (außer Glasbruch).

Anweisungen:

Aufbewahrung und Transport: Instrumente unmittelbar nach der Anwendung in eine mit einem geeigneten Reinigungs-/Desinfektionsmittel befüllte Instrumentenschale geben. Das Einlegen verhindert das Antrocknen von Rückständen. Es wird empfohlen, die Wiederaufbereitung der Instrumente spätestens eine Stunde nach Anwendung vor-

zunehmen. Der Transport der Instrumente zum Aufbereitungsort sollte in einer geschlossenen Instrumentenschale erfolgen.

Reinigungsvorbereitung: Keine besonderen Anforderungen. Gummiball von Schröpfglas nehmen.

Sterilisation: Die Schröpfgläser können mit den folgenden Sterilisationsparametern erfolgreich sterilisiert werden:

- Fraktioniertes Vorvakuum (3fach)
- Sterilisationstemperatur: min. 132 °C, max. 137 °C
- Haltezeit: mindestens 3 min (Vollzyklus)
- Trocknungszeit: 10 min

Der Ball kann nur kochsterilisiert werden (10 min. in kochendes Wasser legen).

Kontrolle und Funktionsprüfung: Alle Instrumente: Sichtprüfung vor Gebrauch auf Beschädigung und Verschleiß durchführen (z.B. Glasbruch).

Kontakt: Adresse oder Tel.-Nr. des Fachhändlers oder wählen Sie +49-7141-660550.

Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.